

Instrucțiuni de utilizare

Șervețele Innolin fara alcool

Deschideți partea superioară a pachetului cu lavete impregnate și puneți-l în tubul dozator, dacă este disponibil. Trageți laveta din mijlocul ruloului și rupeti-o de jos, prin orificiul din capac, apoi închideți capacul. Ștergeți cu atenție zona de dezinfectat și lăsați să acționeze.

Înainte de a utiliza produsul pe suprafețe din materiale sensibile, cum ar fi pielea sintetică, testați mai întâi toleranța materialului pe o zonă mică.

Pentru a preveni formarea de dâre, zonele tratate trebuie șterse la intervale regulate cu o cârpă umedă (cu apă) de unică folosință.

După deschiderea pungii, lavetele pot fi folosite timp de 28 de zile în recipientul dozator.

În timpul aplicării, a se purta mănuși adecvate (de exemplu, din cauciuc nitrilic).

Spectrul de acțiune:

- bactericid (inclusiv MRSA) conform VAH, EN 13727 (1 min), EN 13697 (1 min), EN 16615 (1 min);
- levuricid (candida albicans) conform VAH, EN 13624 (1 min), EN 13697 (1 min), EN 16615 (1 min);
- efect virucid limitat (eficient împotriva virusurilor capsulate, cum ar fi HIV, HBV, HCV – 1 min).

A se utiliza înainte de data înscrisă pe ambalaj.