



Informații produs

Spray dezinfectant Innolin RAPID

1000 ml

REF 3010I

Caracteristici

- Spray dezinfectant cu alcool unic redus
- Spectru cuprinzător și larg de eficiență în doar 1 minut timp de aplicare
- Inspectat și certificat conform celor mai recente reglementări
- Licențiat ca dispozitiv medical de clasă IIb

Tip produs

Spray dezinfectant gata de utilizare, bazat pe alcooli și aditivi eficienți. Fără aldehide și cu un miros plăcut.

Date fizico-chimice

Densitate: 0,938g / ml
Valoarea pH-ului: 6-9

Domenii de utilizare

Dezinfectant rapid alcoolic gata pentru utilizare pentru suprafața
Profilactică dezinfectarea dispozitivelor medicale rezistente la alcool.
Nu este potrivit pentru dezinfectarea termică a dispozitivelor medicale invazive.

Aplicare

Aplicați dezinfectantul rapid care acoperă întreaga suprafață.
Produsul are efect în funcție de timpii de aplicare menționați.
Numai pentru materiale rezistente la alcool.

Timpi de aplicare

Bacterii conform EN 13727 și EN 13697 (condiții murdare):

Conc. 1 min.

Candida albicans conform EN 13624 și EN 13697 (condiții murdare):

Conc. 1 min.

Inactivarea TbB (tuberculoză) (M. terrae) conform DGHM (condiții murdare):

Conc. 1 min.

Virusuri capsulate (de exemplu, VHB, HIV și VHC), conform RKI / DVV, condiții murdare:

Conc. 1 min.

Adenovirusuri (condiții curate):

Conc. 1 min.

Norovirusuri (EN 14476, condiții curate):

Conc. 1 min.

Rotavirusuri (EN 14476, condiții curate):

Conc. 1 min.

Certificate

Produsele noastre au fost examinate și testate științific în conformitate cu cele mai recente metode.

Distribuitor autorizat
Remix Com SRL, Adresa: Str.
Cpt. Ion Gârbea nr. 26, bloc
Lamă, sc. B, et. 1, ap. 12,
sector 5, București; Tel/Fax:
021/313.77.88; E-mail:
office@remixcom.ro.

Producător
PRISMAN GmbH
Otto-Hahn-Ring 6-18
64653 Lorsch
Germania

Instrucțiuni de siguranță

H 226 Lichid și vapori inflamabili.

Păstrați departe de căldură / scântei / flăcări / suprafețe calde. Nu fumați. Păstrați recipientul etanș. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție o perioadă lungă de timp cu apă. Îndepărtați orice lentile de contact, dacă este posibil. Închideți recipientele și depozitați-le într-un loc bine ventilat. Eliminați conținutul / containerul în conformitate cu reglementările locale / regionale / naționale / internaționale.

Inflamabil! Nu pulverizați în flăcări! Punct de aprindere conform DIN 51755: aprox. 27 °C. Aplicație max. 50 ml pe m². Cantitatea totală aplicată pe cameră nu trebuie să depășească mai mult de 100 ml pe m² de suprafață a camerei. Păstrați recipientele bine etanșate. Evitați contactul cu ochii.



Pericol