

Innocid® Dezinfectant pentru instrumente ENZYME ID-ic 35

Dezinfectant enzimatic pentru instrumente

www.Innocid.com



- proprietăți extraordinare de curățare
- raport preț-calitate bun
- protejează împotriva coroziunii
- potrivit pentru majoritatea materialelor
- ID-ic 35 este bactericid, fungicid*, tuberculocid și virucid**
**C.albicans* ** *Virusi încapsulați*

De ce să folosiți Innocid® ID-ic 35?

Dezinfectarea și curățarea instrumentelor chirurgicale și a burghiilor stomatologice înainte de procedurile de sterilizare necesită o aplicare de încredere și compatibilă. În același timp, este important să folosiți un preparat economic și în același timp versatil, cu proprietăți excelente de curățare. S-a dovedit că preparatele enzimatiche au o activitate completă de curățare, precum și un efect dezinfectant.

Am dezvoltat Dezinfectantul pentru instrumente ENZYME ID-ic 35 pentru clienții noștri care vor să aibă un produs cu proprietăți excelente de curățare. Cele trei enzime adăugate asigură efecte extraordinare de curățare, pentru un spectru complet de activitate. În plus, Dezinfectantul pentru instrumente ENZYME Innocid® ID-ic 35 protejează instrumentele și împotriva coroziunii.

La ce se folosește Innocid® ID-ic 35?

Folosiți dezinfectantul pentru instrumente ENZYME Innocid® ID-ic 35 la curățarea și dezinfectarea instrumentelor chirurgicale sau stomatologice de orice tip, inclusiv endoscoape.

Cum să folosiți Innocid® ID-ic 35?

1. Dezinfectantul pentru instrumente ENZYME Innocid® ID-ic 35 este un produs concentrat care trebuie diluat înainte de utilizare. Alegeți concentrația în funcție de preferințe.

¹ Anumiți viruși ca HBV, HCV, HDV, HIV, Gripă tip A, B, C (gripă aviară), virusul variolic, virusul herpes simplex, virus varicelo-zosterian, virusul herpetic uman, virusul sincitial respirator, virusul limfotropic al celulelor T umane și virusul encefalitei transmis de căpușă sunt înveliți într-o membrană protectoare. Toate produsele dezinfectante Innocid vă protejează împotriva tuturor virușilor încapsulați.

² Bacteriile MRSA (Stafilococul auriu rezistent la meticilină), cunoscute sub numele de „viruși spitalicești” cuprind toate formele de Stafilococ Auriu rezistente la antibioticele beta-lactamice, care sunt din perioada Penicilinei. Toate produsele dezinfectante Innocid sunt active împotriva tuturor formelor de Stafilococ Auriu și vă protejează împotriva MRSA.

Innocid by PRISMAN Pharma International AG – Am Stalden 16 – 4622 Egerkingen, Elveția
– Tel. +41 62 206 206 0 – www.innocid.com Rev. 01 05-2014