



Innosept Plus

Detergent dezinfectant concentrat pentru instrumentar medical

✓ POTRIVIT ȘI PENTRU
ECHIPAMENTE DE DOZARE

✓ COMPATIBIL CU
MAJORITATEA
MATERIALELOR

✓ FĂRĂ ALDEHIDE ȘI
PEROXIZI, NU ESTE
COROZIV

✓ EFECT BACTERICID,
FUNGICID,
MYCOBACTERICID ȘI
VIRUCID



DATE CHIMICE ALE INNOSEPT PLUS

Conține: clorură de didecildimetilamoniu, N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan -1,3-diamină
Valoare pH la 20° C: >11

Produs înregistrat ca dispozitiv medical clasa IIB

CÂND SĂ FOLOSIȚI INNOSEPT PLUS

Concentrat lichid pentru curățarea manuală și dezinfectarea instrumentelor medicale și chirurgicale invazive și neinvazive în procesele de imersie.

MOD DE UTILIZARE

1. Se diluează concentratul cu apă caldă cu temperatura de 10 °C până la 30 °C (având cel puțin calitatea apei potabile). În caz de condiții foarte murdare, curățați mai întâi instrumentele.
2. Cufundați instrumentele deschise în soluție. Toate suprafețele și cavitățile care urmează să fie dezinfectate trebuie acoperite integral de soluție. În funcție de gradul de contaminare, poate fi necesară înlocuirea soluției de lucru (recomandare RKI: cel puțin o dată pe zi lucrătoare).
3. După dezinfectare, instrumentele trebuie clătite, în mod ideal cu apă demineralizată, și uscate bine. Pentru instrumentele critice este recomandată sterilizarea suplimentară, conform RKI.

Nu amestecați cu agenți de curățare sau cu alți dezinfectanți. Când utilizați materiale noi, toleranța trebuie verificată în avans.

DATE MICROBIOLOGICE ALE INNOSEPT PLUS

Innosept Plus are efect bactericid, fungicid, mycobactericid, virucid.

	Diluție 3%
Bacterii (incl. MRSA*)	15 minute
Levuri (C.albicans)	15 minute
Funghi (A. brasiliensis)	60 minute
Mycobacterii	60 minute
Virusuri	30 minute

*Toate produsele dezinfectante Innocid acționează împotriva tuturor formelor de stafilococ auriu și vă protejează de MRSA (stafilococ auriu rezistent la meticilină).

INNOSEPT PLUS ESTE DISPONIBIL ÎN URMĂTOARELE FORME

Flacoane 1L
Canistre 5L



PRODUS ÎN GERMANIA

