



- ✓ **DETERGENT ȘI DEZINFECTANT DE NIVEL MEDIU PENTRU SUPRAFEȚE ȘI PRODUSE MEDICALE**
- ✓ **FĂRĂ ALDEHIDE, FĂRĂ PEROXIZI, FĂRĂ CLOR**
- ✓ **ACTIVITATE LARGĂ, LA CONCENTRAȚII SCĂZUTE**
- ✓ **EFFECT BACTERICID, FUNGICID, MYCOBACTERICID, TUBERCULOCID, VIRUCID**
- ✓ **NU LASĂ REZIDUURI LIPICIOASE**

### AVIZ BIOCID

nr. 6101BIO/02/12.24

avizat pentru utilizare în unități sanitare

# Innolin High

Dezinfectant concentrat pentru curățarea și dezinfectarea suprafețelor semi-critice



## DATE CHIMICE ALE INNOLIN HIGH

Conține: clorură de didecildimetilamoniu, N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diamină, aditiv

Valoare pH:  $10.7 \pm 0.2$

Aspect: lichid

## CÂND SĂ FOLOSIȚI INNOLIN HIGH

Folosiți Innolin High pentru curățarea și dezinfectarea suprafețelor și produselor medicale. Nu este potrivit pentru policarbonat și BMC.

## MOD DE UTILIZARE

1. Innolin High este un produs concentrat, care trebuie diluat înainte de a fi utilizat. Alegeți concentrația dorită.
2. Înainte de a utiliza produsul pe suprafețe mari de materiale sensibile, cum ar fi pielea artificială, testați mai întâi toleranța materialului pe o zonă mică, ascunsă.
3. Stergeți suprafețele respective cu soluția preparată. Pentru a preveni formarea de dungă, zonele tratate trebuie șterse la intervale regulate cu o cârpă umedă (cu apă) de unică folosință.
4. Lăsați produsul să-și facă efectul în timpul indicat pentru concentrația aleasă. Nu amestecați cu agenți de curățare sau alți dezinfectanți!

## DATE MICROBIOLOGICE ALE INNOLIN HIGH

Innolin High are efect bactericid, fungicid, mycobactericid, tuberculocid și virucid.

Diluție: 1% - 5%

Timp de acțiune: 15 min. - 60 min.

\*Avizul biocid se poate oferi la cerere

## INNOLIN HIGH ESTE DISPONIBIL ÎN URMĂTOARELE FORME:

Flacoane 1L

Canistre 5L



PRODUS ÎN GERMANIA



Distribuitor: Str. Cpt. Ion Gârbea nr. 26, bloc Lama, sc. B, et. 1, ap. 12, sector 5, București; Tel/Fax: 021/313.77.88; E-mail: office@remixcom.ro Producător: Prisman GmbH, Otto-Hahn-Ring 6-18, DE-Lorsch, Germania; E-mail: info@prisman.de