

## CHEMGENE HLD4 – dezinfectant de nivel înalt pentru suprafețe

### MOD UTILIZARE

1. Chemgene HLD4 este un produs concentrat, care trebuie diluat înainte de utilizare. Alegeți concentrația dorită.
2. Ștergeți suprafețele respective cu soluția preparată de Chemgene HLD4 și asigurați-vă că suprafețele care urmează a fi dezinfectate sunt complet umede.
3. Lăsați produsul să-și facă efectul în timpul indicat pentru concentrația aleasă.

### COMPOZITIE

Didecyldimethylammonium chloride: 3,1%; acid d-gluconic, compusul cu N, N'-bis-(4-clorofenil)-3, 12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecandiamidina (2:1) 20%: 4,8%

### SPECTRU, TIMPI APLICARE

**La o dilutie de 2% (20 ml concentrat in 1L apa) timp de aplicare 5 min, produsul are urmatorul spectru:**

Bactericid (SR EN 1276, SR EN 13697, MRSA), fungicid (SR EN 1650), virucid (SR EN 14476), sporicid (SR EN 14347)

### PRECAUTII

1. Spălați-vă pe mâini înainte de pauze și la terminarea lucrului.
2. Evitați contactul cu ochii și pielea.
3. Folosiți echipament de protecție.
4. Recomandare: Eliminarea se va face în conformitate cu reglementările oficiale.