



Chemgene HLD4H Concentrat

Dezinfectant concentrat pentru suprafețe și echipamente medicale, inclusiv echipamente din laboratoare medicale

Dezinfectant concentrat fără alcool

- ✓ NU ESTE COROZIV
- ✓ NU CONȚINE ALCOOL
- ✓ NU DECOLOREAZĂ, NU ALBEȘTE, NU PĂTEAZĂ
- ✓ NU ARE ACȚIUNE IRITANTĂ ASUPRA PIELII, CĂILOR RESPIRATORII, MUCOASEI OCULARE ȘI BUCALE ȘI NU NECESITĂ UTILIZARE ÎN ÎNCĂPERI CU VENTILAȚIE SPECIALĂ



DATE CHIMICE ALE CHEMGENE HLD4H CONCENTRAT

Conține: digluconat de clorhexedrină, clorură de didecil dimetil amoniu <10%

Aspect: lichid albastru deschis

CÂND SĂ FOLOSIȚI CHEMGENE HLD4H CONCENTRAT ?

Folosiți Chemgene HLD4H pentru curățarea și dezinfecția suprafețelor echipamentelor și dispozitivelor medicale. Poate fi utilizat pe orice categorie de material (covor PVC tip Tarkett, inox, plastic etc.).

Nu folosiți Chemgene HLD4H pentru dezinfecția dispozitivelor medicale invazive.

MOD DE UTILIZARE

1. Chemgene HLD4H este un produs concentrat, care trebuie diluat înainte de utilizare. Alegeți concentrația dorită.
2. Ștergeți suprafețele respective cu soluția preparată de Chemgene HLD4H și asigurați-vă că suprafețele care urmează a fi dezinfectate sunt complet umede.
3. Lăsați Chemgene HLD4H să-și facă efectul în timpul indicat pentru concentrația aleasă.
4. Nu necesită clătire.

CONCENTRAȚII DE UTILIZARE

- 2% - 10%

CHEMGENE HLD4H CONCENTRAT ESTE DISPONIBIL ÎN URMĂTOARELE FORME

1L - Dispozitiv medical clasa IIa

FABRICAT ÎN MAREA BRITANIE